



DOCUMENTATION

cleansweep™

Logiciel de contrôle des infections


Bénéficiant des dernières technologies en matière de contrôle de l'aseptie, le clavier Cleankeys® Corning® GORILLA® 2 est équipé du logiciel cleansweep qui vous permet de mesurer à l'aide de détecteur de chaleur le degré de contamination de votre clavier.

Directement paramétrable depuis votre interface d'installation le logiciel cleanSweep vous apporte précision et surveillance dans la lutte quotidienne pour l'aseptie de votre environnement de travail qu'il soit médical ou industriel.

Démarrage

Intégré au logiciel d'installation de votre clavier le logiciel cleansweep est directement accessible en effectuant un clic droit sur l'icône "ck".

Le logiciel cleansweep est actif dès le démarrage de votre ordinateur.

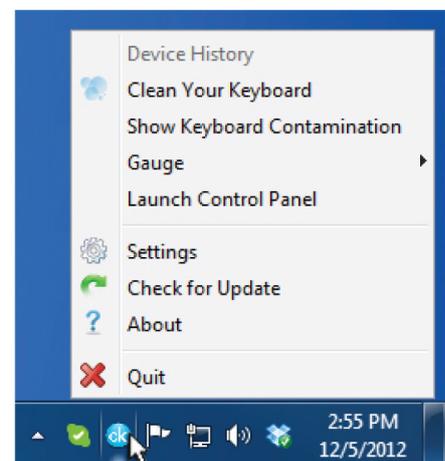

Connaitre le degré de contamination de votre clavier

Indiqué par une jauge, le degré de contamination est très simple à connaître et facilement identifiable. Vous pouvez ainsi au fil de l'utilisation de votre clavier, contrôler de manière très précise l'aseptie de votre clavier. Ainsi, le pourcentage de contamination indiqué par la jauge augmentera proportionnellement au degrés de contamination de votre clavier. De la même manière, l'indication couleur indiquée par la jauge vous permet de mesurer la contamination de votre clavier :

Vert : clavier sain


Rouge : nettoyage recommandé



Carte de contamination du clavier

Par simple clic droit sur l'icône "ck" (choisir "Nettoyer votre clavier" dans le menu contextuel qui s'affiche) vous pouvez afficher une carte de contamination de votre clavier vous indiquant de manière précise les zones contaminées, les touches nécessitant un nettoyage ainsi que celles qui devront faire l'objet d'une décontamination prochaine.


Carte de contamination du clavier

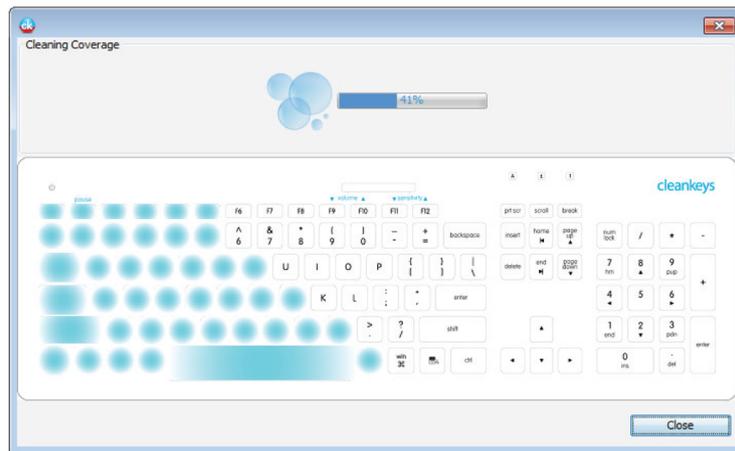

Contrôle du seuil de contamination de votre clavier

Entièrement paramétrable le logiciel cleansweep vous permet de contrôler de manière très précise le seuil de contamination de votre clavier en indiquant pour chacune des touches le nombre de pression maximale supportée avant de procéder à un nettoyage et une décontamination de votre clavier.

Lorsque ce seuil est atteint une fenêtre d'alerte s'affiche sur votre écran vous invitant à procéder à un nettoyage de votre clavier.

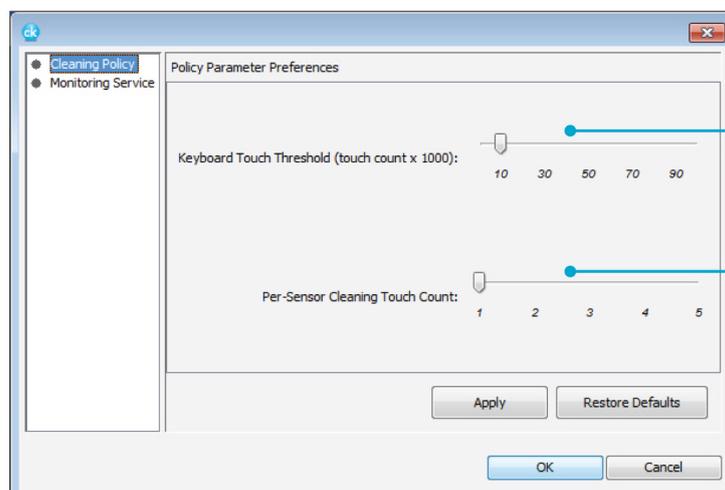

Touches

Cleaning Touches